

	<b>JURUSAN KESEHATAN GIGI POLTEKKES KEMENKES ACEH</b>	No. Dokumen : HK.02.03/ /2023
	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	No. Revisi :
	<b>INSTRUKSI KERJA DENTAL UNIT GNATUS</b>	Tanggal : 10 Oktober 2023 Halaman :
<b>UNIT: LABORATORIUM JURUSAN KESEHATAN GIGI</b>		Petugas : Mahasiswa, Dosen dan Laboran

### 1. Tujuan

Memberikan rujukan atau panduan terhadap pengoperasian alat di lingkungan Politeknik Kesehatan Aceh

### 2. Ruang Lingkup

Prosedur pengoperasian alat ini berlaku untuk semua penggunaan alat yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen yang berada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh dan pihak lain yang berada di luar Poltekkes Kemenkes Aceh

### 3. Definisi

Alat yang nntuk melakukan tindakan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut

### 4. Petugas

Mahasiswa yang bertugas sebagai piket dan tenaga laboran

### 5. Referensi

- A. Buku Panduan Laboratorium Politeknik Kesehatan Aceh
- B. *Manual Book*

### 6. Instruksi Kerja

1. Periksa Sumber Daya: Pastikan sumber daya (air, listrik, dan udara kompresor) sudah terhubung dan bekerja normal.
2. Gunakan pedal untuk menyesuaikan posisi kerja
3. Pastikan pasien merasa nyaman dan aman dengan posisi kursi yang telah diatur.
4. Pilih antara handpiece high-speed untuk prosedur pengeboran dan low-speed untuk polesan atau pembersihan.
5. Sesuaikan kecepatan melalui pedal atau tombol sesuai kebutuhan prosedur.
6. Atur posisi lampu agar sinar tidak langsung ke mata pasien tetapi menerangi area mulut dengan baik.
7. Pastikan setelah selesai menggunakan, tombol kembali ke posisi *off* untuk menjaga keamanan dan efisiensi energi..

### 7. Cara Perawatan

1. Matikan Unit: Pastikan seluruh bagian unit dalam kondisi *off* dan sumber daya terputus.
2. Bersihkan dan desinfeksi setiap bagian, terutama area yang kontak langsung dengan pasien.
3. Perawatan Rutin: Lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi dan performa Dental Unit GNATUS sesuai dengan instruksi produsen

Disiapkan oleh  
Koordinator Laboratorium



Nurhaida, SKM  
NIP. 197502032002122002

Diperiksa oleh  
Ka Prodi Terapi Gigi  
Program Sarjana Terapan



Reza, SST, M. Kes  
NIP. 198307082005012001

Disahkan oleh  
Ketua Jurusan Kesehatan Gigi



Nurdin, S. SiT, MDSc  
NIP.197105181994031002